

PAWS

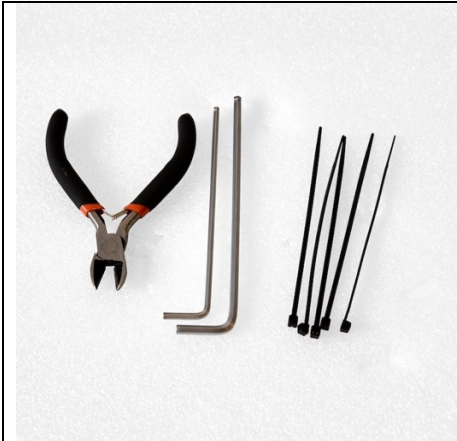
Byte av kontrollenhet



Monteringsanvisning (SE)



Monteringsanvisning

		
För arbetet behöver du: en avbitartång, en 3mm och 4mm insexnyckel samt buntband.	Kontrollenheten kommer komplett med apparatlåda och kablage.	Försäkra dig om att du har rätt kontrollenhet som matchar din PAWS.
		
Börja med att ta av batteriet.	Koppla loss kabeln mellan batterihållaren och kontrollenheten.	Koppla även ur kabeln från motorn till kontrollenheten.
		
Koppla bort kabeln mellan strålkastaren och kontrollenheten.	Med en 3mm insexnyckel lossar du de tre skruvarna till batterihållaren.	Lyft av batterihållaren.

		
Klipp upp de buntband som håller fast kablaget. Se till att du får fri tillgång till alla kopplingar som sitter under kabelstrumpan.	Koppla isär alla kopplingar.	Lossa resårbandet som håller fast kablaget mot styrstammen.
		
Med en 3mm insexnyckel lossar du alla sex skruvar som håller fast kontrollenheten.	Lyft av kontrollenheten.	Nu ser din PAWS ut så här med batteri, batterihållare och kontrollenhet borttagna.
		
Montera den nya kontrollenheten och koppla ihop alla kontakter igen. Innan du sätter fast kablar med nya buntband bör du testa att din PAWS fungerar som den ska.	Nu har du en fungerande PAWS igen med kablaget draget för att minska risken att det fastnar i något.	