

PAWS



REHASENSE

CHECKLISTA VID UTPROVNING



GRUNDINFORMATION:

Namn:				
Kontaktinformation:				
Kön:	Kvinna	Man	Ange själv	Vill inte svara
Ålder:				
Funktionsnedsättning:				
Vikt:				
Längd:				
Armlängd:	kort	normal	lång	
Benlängd:	kort	normal	lång	

ANVÄNDNINGSSITUATION:

Procent användande inomhus:
Procent användande utomhus:
Procent användande i svårare terräng
Dagligt användande på olika underlag: Platt, kuperat, grus, gräs, lera etc:
Huvudanvändning: Transport, shopping, off road, cykla med vänner etc:
Transportera PAWS med bil:

KROPPSFUNKTION:

Stark eller svag i överkroppen:
Sittbalans (bra, dålig, ingen):
Tricepsstyrka (1-5)*:
Underarm och handled . Pronation och supination (1-5)*:
Fingrar, extension och flexion (1-5)*:
Enligt ovan – behöver manuell eller automatisk fastsättning och lyft?:
Enligt ovan – Behöver standard- eller tetrareglage?:
Om tetrareglage – behöver horisontella eller vertikala handtag?:
Enligt ovan – behöver tumgas?:
Enligt ovan – behöver enhandsreglage? – vänster eller höger?

RULLSTOLEN:

Märke och modell?:
Fast eller kryssramstol
Normal, kort eller lång ram?:
Sittsbredd:
Bredd vid fastsättningspunkt?:
Rörmaterial?:
Rörtyp: rund, oval eller annan?:
Rördiameter vid fastsättningspunkt?:
Längd på rak sträcka vid fastsättningspunkt:
Hjuldiameter (22", 24", 25", 26" eller annan)?:
Enligt ovan – behövs rörskydd?:
Enligt ovan – behövs standard eller 150mm bredd för PAWS mittdel?:
Enligt ovan – behövs längre (220mm) fastsättningsarmar?:
Enligt ovan – behövs speciell klämsprofil? Vilken? (Kuschall etc):
Enligt ovan – behövs fast fotplatta?:

CHECKLISTA:

- Se till att systemet är strömsatt och igång för de sista processtegen
- Se till att hastighetsgränserna är inställda enligt de regler som är anpassade till kundens behov med den förskrivande specialisten
- Justera och testa koppling och lyft; registrera inställningar på checklistan
- Alla reglage testade för full dynamisk funktion – genom fullt hastighetsområde och full bromsning
- Se till att kundens kropp är fri från alla rörliga delar och att kontroller är åtkomliga
- Upprepa alla funktioner med klienten för att säkerställa en tydlig förståelse av alla möjliga funktioner i processen "start upp, genom användning för att stänga av"
- Se till att klienten självständigt kan upprepa alla steg samt har dynamisk kontroll över enheterna
- Gå igenom den regelbundna underhållsnyckeln med kunden för att säkerställa att de förstår sina skyldigheter för att se till att enheten är redo att användas
- Kunden har blivit instruerad i säker användning och skötsel av sin enhet
- Förskrivaren är övertygad om att enheten når klientens funktionella förväntningar
- Passnings- och kontrollprotokollen bifogas



Flottiljvägen 19
SE-392 41 Kalmar | Sweden
M: +46 722 325 090
E: info@wihlbackamobility.se
W: wihlbackamobility.se

Rehasense's quality management complies with both the ISO 9001 and ISO 13485 standards, as confirmed by TÜV NORD.

Rehasense's medical devices are CE-marked and meet the requirements of EU Regulation 2017/745 (MDR).

Copyright Rehasense® 2022

