

DRIVER

Quick guide (SE)



REHASENSE





1. Låsknappen och bärhandtag
2. Bromshandtag
3. Ratt för höjdjustering av handtag
4. Väska med reflexdetaljer (tillbehör)

Utfällning av DRIVER rollatorn

1. Dra den röda låshaspen moturs
2. Fäll ut rollatorn genom att föra sittdelen utåt



Utfällning av DRIVER rollatorn

1. Pressa utsidorna av sitsen ner mot kryssdelen tills sitsen låses i ramen



Höjdinställning av DRIVER handtag

1. Lossa ratten för höjdjustering




Höjdinställning av DRIVER handtag

1. Ställ in handtaget i önskat läge genom att föra handtaget uppåt/neråt
2. Använd markeringarna och hålbilderna för att säkerställa inställningen
3. Dra åt ratten för höjdjusteringen




Rekommenderad höjd på handtaget

Handtaget bör ställas in i samma höjd som handleden hos brukaren, då denne står med lätt böjd armbåge.

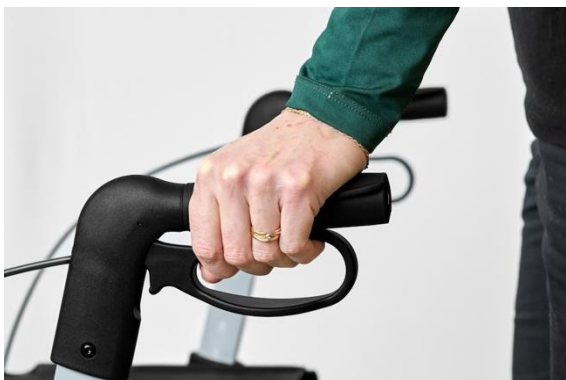

Aktiv inbromsning

1. Krama bromshandtaget för att sakta ned och stanna rollatorn

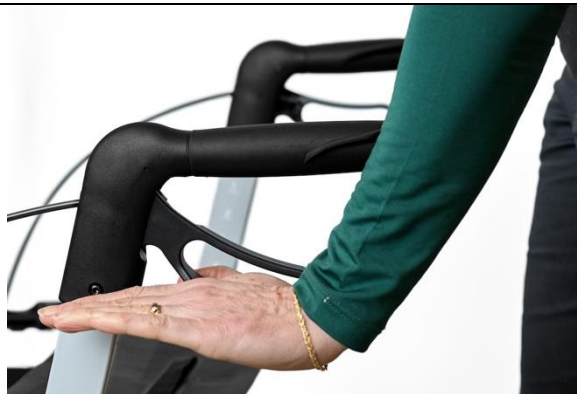

Parkeringsbroms

1. Pressa handtagen neråt tills de låser sig
2. Parkeringsbroms måste aktiveras om brukaren vill sätta sig på sitsen
3. Parkeringsbroms måste aktiveras vid uppresning till stående alt när brukaren ska sätta sig



Hoppfällning av DRIVER

1. Dra ringen under sitsen bakåt för att låsa upp rollatorn
2. För sidorna in mot varandra
3. Lås rollatorn med den röda haspen



WIHLBACKA
mobility

Flottiljvägen 19
SE-392 41 Kalmar | Sweden
M: +46 722 325 090
E: info@wihlbackamobility.se
W: wihlbackamobility.se