

PAWS

Byte av styrfjäder

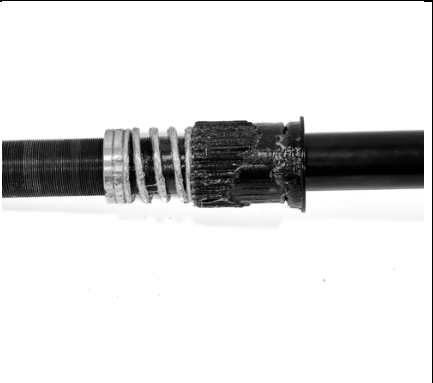


Monteringsanvisning (SE)



Monteringsanvisning

		
För arbetet behöver du: en ny styrfjäder, ett skjutmått, 2 x haknycklar 34-36, 5 mm insexnyckel, 17 mm ringnyckel och en brännare.	Börja med att lossa båda bromsvajrarna helt från bromsoken	
		
Denna process beskriver en PAWS med tetrabromsar men är densamma för standardbromsar (förutom kåpan)	Lossa alla fyra skruvarna som håller bromskåpan på plats.	
		
Koppla loss båda bromsvajrarna.	Här är båda två fränkopplade.	Lossa kronmuttern med en 17 mm ringnyckel. Den sitter fast med Locktite så det kan behövas lite kraft.

		
Lossa båda bultarna som håller fast styrstammen. Lyft bort styret.	Plocka bort alla delar från styrenheten och lägg dem i ordning.	Lossade delar, tillbakamontering från höger till vänster.
		
Lossa motorkabelns kontakt	Lossa även kontakten till framlyset.	Dra ut hela styrenheten från chassit.
		
Här syns styrfjädern, den är fastlåst med två gängade hakbrickor varav den översta är låst med Locktite.	Använd en blåslampa för att lösa upp limmet (Locktite)	Använd de båda haknycklarna för att lossa på de gängade brickorna. Skruva ut dem helt. VARNING - De kan vara mycket varma!
 Lyft bort styrfjädern och ersätt med en ny.	 Skruva tillbaks de gängade brickorna. Dra den nedersta så att fjädern får rätt längd. 33 mm för City och 27 mm för Cruiser och Tourer. Lås med den övre brickan samt Locktite.	Montering sker i omvänd ordning.