

PAWS horisontella stödben



Monteringsanvisning (SE)



Artikelnummer:

EBL01CD (16" PAWS)

EBL01EF (20" PAWS)



Monteringsanvisning



1. Lokalisera monteringshålen i gaffeln.




2. För in fästet till stödbenen mellan bromsvajern och gaffeln.



3. Använd två av de medföljande skruvarna för att fästa stödbenet i framgaffeln.



4. Dra fast med en 5 mm insexnyckel.

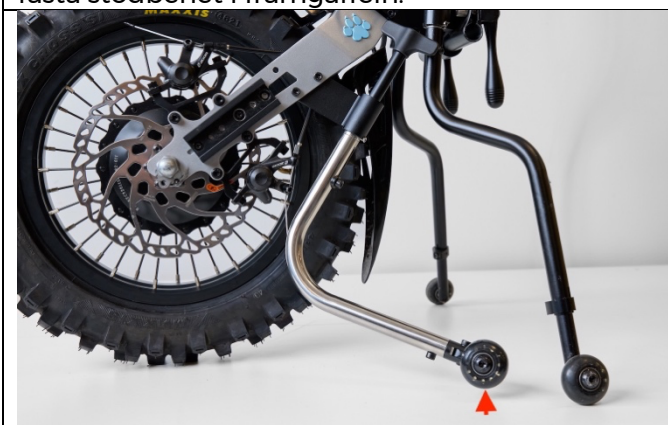


Vik ned stödbenet. Hjulet ska nå ända ned till underlaget. På ovanstående bild ser man att stödhjulet har någon cm ner till underlaget.



6. Lossa på skruven på stödbenet med en 5 mm insexnyckel och dra ned benet tills stödhjulet står stadigt på underlaget. Lås fast skruven igen.



På ovanstående bild ser man att stödbenet förlängts med ca en cm för att stödhjulet ska få kontakt med underlaget.

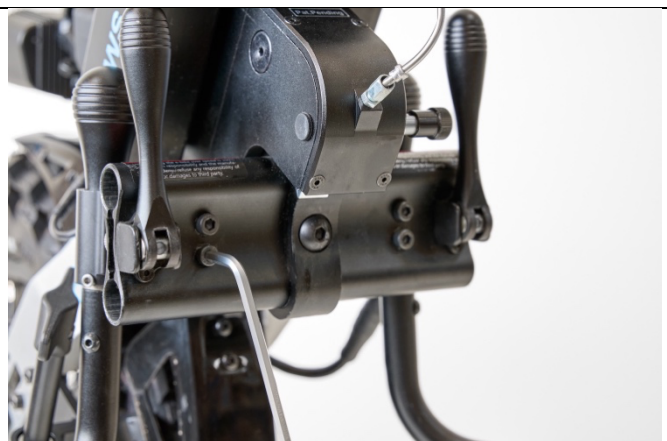

När det nya stödbenet är injusterat är det dags att ta bort det gamla på samma sida. Använd en 5 mm insexnyckel för att lossa de två skruvarna som håller det på plats.



Här är det gamla stödbenet avtaget och det nya benet har tagit över uppgiften.



På andra sidan behöver man flytta motorkabeln för att frigöra skruvhålen som ska användas till det nya stödbenet. Använd en 3 mm insexnyckel och en 8 mm fast nyckel för att lossa båda skruvarna till kabeln.



Flytta upp kabeln och montera i de övre hålen.



När båda stödbenen är monterade använder vi en 5 mm insexnyckel och lossar skruvarna som ställer in stödhjulets vinkel. Justera dem så att de är parallella med färdriktningen (parallella med motorhjulet) och lås fast.