

# PIXEL

**Rollator för inomhusbruk**

**Bruksanvisning (SE)**



**Rehasense® Sp.z o.o.**  
Sulejowska 45 G  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Poland

## Allmän information

Bäste kund,

Denna bruksanvisning innehåller en beskrivning av detta hjälpmedel inkl viktiga instruktioner för att säkerställa korrekt och säker användning av produkten. Det är viktigt att läsa denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten. Det är särskilt viktigt att läsa och följa säkerhetskraven.

REHASENSE utvecklar ständigt sina produkter och förbehåller sig rätten att ändra produkternas specifikationer och egenskaper utan föregående meddelande, om inte annat avtalats.

Vid frågor, vänligen kontakta din Rehasense Sverige direkt. Kontaktinformation finns på sista sidan i bruksanvisningen.

## 1. Avsedd användning, anvisningar och förbud

Avsedd användning: Rollatorn är utformad för att hjälpa personer som har svårt att stå eller gå på egen hand. Andra användningsområden är inte tillåtna. Rollatorn är avsedd för inomhusbruk.

Instruktioner: Rollatorn är avsedd speciellt för de personer som på grund av ett brett spektrum av behov behöver stöd under gång.

Rekommendation: En funktionsbedömning gjord av lämplig hälso- och sjukvårdspersonal rekommenderas före användning.

## 2. Leverans & allmän beskrivning

Rollatorer levereras i kartonger och viks ihop för enklare transport.

Innehåll:

- ✓ 1 rollator, hopfällad
- ✓ 1 bricka
- ✓ 1 tygväska och nätpåse för mindre föremål
- ✓ 1 bruksanvisning

**Pixel** är en fyrhjulig, lätt och stabil rollator med hopfällbar ram. Den är gjord av aluminium för att vara smidig att manövrera och enkel att förvara samt transportera. Dess körbåge är höj- och sänkbar för bäst anpassning efter användaren. Ramkonstruktionen består av pulverlackerade aluminiumrör. Produkten är dessutom försedd med en väska av tyg och en plastbricka på vilken användaren kan ta med sig små föremål. Rollatorn är utrustad med 6 tums hjul som lämpar sig bra för inomhusbruk.

## 3. Kvalitetsstandard

Pixel rollatorn uppfyller följande europeiska standarder:

- ISO 11199-2:2005
- EU-förordning 2017/745 (MDR)

## 4. Säkerhetskrav

Se till att denna bruksanvisning har lästs av alla som hanterar rollatorn.




### OBS!

- Brukarvikten får inte överstiga 110 kg
- Rollatorväskan får inte belastas med mer än 5 kg
- Rollatorn är avsedd för inomhusbruk
- Bromsarna bör sättas i parkeringsläge före och efter bruk



### VIKTIGT!

- Använd rollatorn endast för det ändamål den är avsedd för
- Använd rollatorn endast i gott tekniskt skick
- Konstruktiva ändringar utan skriftligt tillstånd från leverantören är ej tillåtna
- Observera risk för klämning mellan rörliga delar
- Rollatorn ska användas på stabila ytor

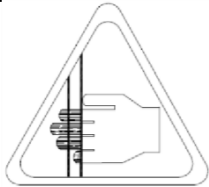

Notera denna symbol på rollatorn och undvik inklämning när rollatorn fälls ihop, fälls ut eller justeras. Observera avståndet mellan rollatorns delar för att undvika att klämma fingrarna eller andra kroppsdelar.

Mind Your Fingers

VID ALLVARLIG INCIDENT/AVVIKELSE, KONTAKTA DIN ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER REHASENSE DIREKT. Omedelbara åtgärderna bör vidtas i enlighet med kraven i Europaparlamentets och rådets förordning 2017/745 om medicintekniska produkter.

## 5. Produktbeskrivning



## 6. Användning

### Leveranskontroll

Efter att ha packat upp rollatorn, kontrollera att ingående delar som beställts finns

### Funktionskontroll

- Innan rollatorn tas i bruk, kontrollera att bultarna som håller fast hjulen är ordentligt fastsatta och att rollatorn är stabil
- Kontrollera bromsens funktion inkl parkeringsläge

### Utfällning av rollatorn

- Ställ rollatorn med hjulen på ett plant golv
- Håll körhandtaget i båda händerna framför dig så att bakhjulen ligger på golvet. Tryck ner den så att ramen öppnas hela vägen
- Hitta den röda ramlåsknappen på ramen. Pressa den på huvudramen tills du hör ett "klick"-ljud från låsmekanismen.




- Försök att dra ihop ramdelarna igen för att vika ramen. Om detta inte är möjligt öppnas ramen och säkras korrekt. Se ÖPPEN-läget på bilden ovan.



- Efter utfällning eller montering kontrollera att ramhalvorna är ordentligt låsta, så att ramen inte rör sig längre.
- Testa alltid för att se att tillbehören är ordentligt och säkert låsta på plats före användning

### Hopfällning av rollatorn

- Tryck på den röda låsknappen, som förbinder korgramen med huvudramen.
- Lyft väskans ram för att dra ihop huvudramshalvorna och för att fälla ihop rollatorn.

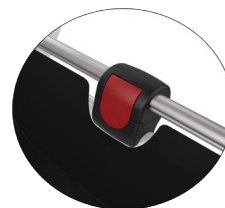

### Justera höjden på körhandtaget

- Lossa handtagets 2 låsknappar.
- Gör justeringar till önskad höjd (samma position höger/vänster)
- Dra åt de 2 ratta

### Använda handbromsarna

- För att stanna rollatorn, drar bromshandtaget uppåt mot körbågen.
- För att stå still med rollatorn, håll bromshandtaget i läge "UPP".
- Släpp bromshandtaget för att kunna börja gå. Det faller ner automatiskt och bromsarna släpps.



- Du bör alltid bromsa när du inte planerar att flytta den
- Lämna inte rollatorn olåst utan uppsikt

**Aktivera/låsa upp parkeringsbroms**

- För att låsa bromsarna, tryck bromshandtaget neråt tills du kan höra "klick"-ljudet.
- För att låsa upp bromsarna, dra bromshandtaget uppåt tills du känner att hjulen är fria att rulla.


## 7. Rengöring, desinfektion och underhåll

**Allmänt**

- Rollatorn samt tillbehör bör rengöras regelbundet/hålles i rent skick för bästa resultat
- Lättare smuts och damm kan avlägsnas med en fuktig trasa
- Hårdare smuts kan avlägsnas med ett mildt rengöringsmedel och varmt vatten
- Undvik slipmedel och/eller blekningsmedel
- Hjulen kan rengöras med varmt vatten och ett mildt rengöringsmedel
- Rollatorn samt tillbehör tål att tvättas i tvätt tunnel/duschkabinett/disk desinfektör max 80° i 10 min
- Vid rengöring med högtryckstvätt, undvik att rikta strålen direkt mot hjullager
- Rollatorn samt tillbehör kan ytdesinficeras med en mjuk trasa eller svamp och ett desinfektionsmedel som innehåller 70–80 % etanol. Vi avråder från desinfektionsmedel som innehåller klor eller fenol.
- Kontrollera regelbundet att hår och annat inte samlar sig mellan hjulen och gafflarna
- Insmörjning av rörliga delar kan göras emellanåt för att underhålla hjulen

## 8. Etikett

Produktetiketten placeras på ett av de nedre rören på tvärramen. Den innehåller viktig information om produkten: namn, serienummer, produktionsdatum, artikelnummer, väskans maxbelastning, produktbredd, storlek och tillverkarens data. Etiketten får aldrig tas bort från hjälpmidlet.

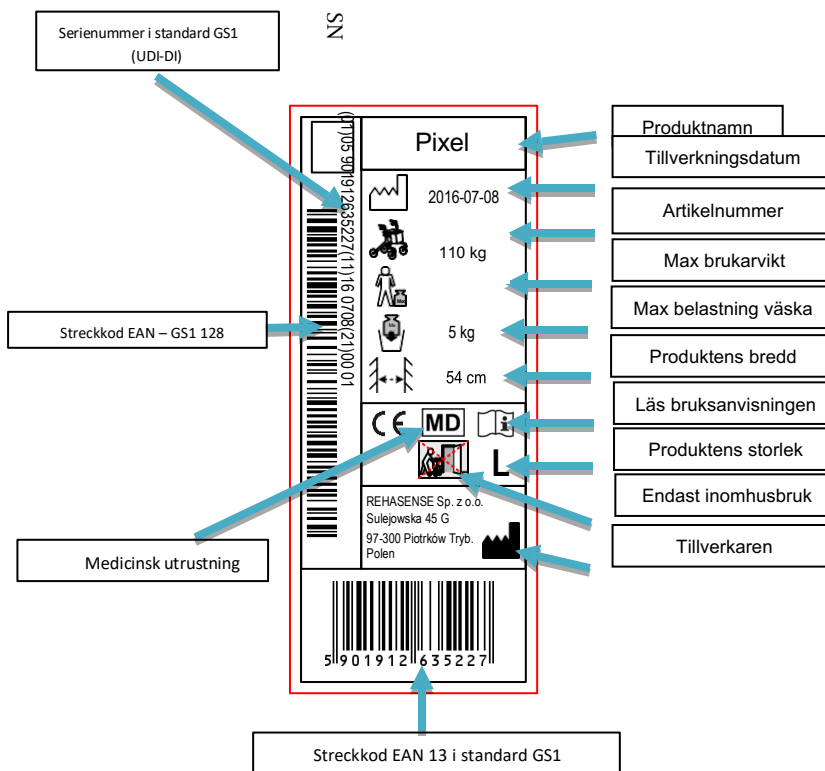

## 9. Tekniska data

|                           |                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------|
| Max. brukarvikt           | 110 kg                                      |
| Max. belastning av väskan | 5 kg                                        |
| Produktvikt utan väska    | 5,2 kg                                      |
| Totallängd                | 65 cm                                       |
| Lägsta höjd (hopfälld)    | 91 cm                                       |
| Totalbredd                | 54 cm                                       |
| Körbågens höjd            | 86 – 97 cm                                  |
| Broms                     | 1 broms på 2 bakhjul med parkeringsfunktion |
| Hjuldimension             | 4x 150 x 27 mm – Black SOFT PU hjul         |

## 10. Transportråd

Rollatorn är lätt att fälla ihop och lätt att transportera. Det rekommenderas att fälla ihop den enligt ovan i bruksanvisningen. Rollatorn bör transporteras på ett sådant sätt att den inte rör sig plötsligt under transporten.

## 11. Rekonditionering och kassation

Rollatorn kan återanvändas. Innan rollatorn lämnas vidare till en annan ska den kontrolleras av kvalificerad personal.

### Funktionskontroll vid rekonditionering

- Visuell inspektion av ramen
- Kontrollera samtliga muttrar, bultar och rörliga delar
- Kontrollera plastkomponenters skick
- Kontrollera hjul, gafflar och kullager
- Kontrollera bromsfunktion och skick

Skadade/trasiga komponenter ska bytas ut. Det rekommenderas att hjulen byts ut när behovet uppstår. Produkten måste rengöras och desinficeras noggrant före återanvändning.

 En rollator med böjd/skev ram ska kasseras

### Kassation

När produkten inte längre kan användas ska den, dess tillbehör och förpackningsmaterial sorteras på rätt sätt. Rollatorn ska lämnas till en deponerings-/avfallsstation för återvinning

## 12. Garanti

- Rollatorn garanteras mot tillverkningsfel är 2 år från leveransdatum om inte annat avtalats
- Reservdelar och tillbehör garanteras mot tillverkningsfel 1 år från leveransdatum om inte annat avtalats
- Garantin täcker inte skador orsakade av felaktig användning och/eller normalt slitage
- Instruktionerna för underhåll och användning måste följas
- Otillåten modifiering av produkten kommer att resultera i att garantin upphör att gälla

## 13. Förväntad livslängd

Produktens förväntade livslängd är tio (10) år om den används i enlighet med bruksanvisningen inkl underhåll och instruktionerna för korrekt användning. Produktens faktiska livslängd kan variera beroende på hur mycket och hur intensivt den används.

**Om tekniska problem uppstår, kontakta din återförsäljare eller hjälpmedelscentral. Du kan också kontakta Rehasense® direkt.**

## Rehasense®

**Tillverkare**  
**Rehasense SP. SOO.**  
Sulejowska 45g  
97-300 Piotrków Trybunalski  
Polen

[www.rehasensesverige.se](http://www.rehasensesverige.se)



WIHLBACKA  
mobility

Flottiljvägen 19  
SE-392 41 Kalmar | Sweden  
M: +46 722 325 090  
E: [info@wihlbackamobility.se](mailto:info@wihlbackamobility.se)  
W: [wihlbackamobility.se](http://wihlbackamobility.se)